


## REINIGING FLEXIBELE ENDOSCOOP

### ALLES KLAARZETTEN

- Kunststof reinigingsbak
- Lekteter
- Lektestkap
- Handschoenen
- Veiligheidsbril
- Schort
- Mondkapje
- Reinigingsmiddel
- Reiniging set
- Borstels
- Droogdoeken
- Bak met lauwwarm water vullen en reinigingsmiddel toedienen
- Geheel op eigen risico (chemisch reinigingsmiddel)

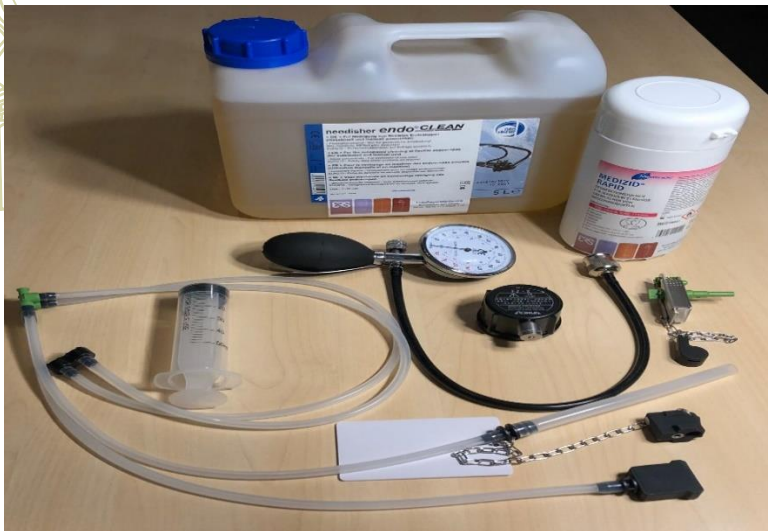

-1-

## LEKTESTEN

- Schroefknop boven op de scoop moet goed dicht zitten
- Lektester op de lektestkap bevestigen
- Lektestkap op de scoop draaien
- Druk oppompen tot ongeveer 160 mmhg
- Controleer de druk deze mag niet zakken (dan heb je lekkage)
- Kwispelen met de kwispelknoppen
- Laat de lektestkap en lektester tot het einde op de scoop zitten
- Lektester moet buiten de waterbak blijven liggen
- Controleer tijdens het reinigingsproces de druk deze mag niet zakken



## LEG DE SCOOP IN DE REINIGINGSVLOEISTOF

- Controleer de druk
- Haal de ventielen eruit, deze blijven in de bak liggen
- Borstel ingang instrumentkanaal
- Borstel afzuigcilinder tot de lichtgeleiderconnector
- Borstel afzuigcilinder tot de distaltip




## SLUIT DE REINIGINGSSET AAN

- Adapterhuis plaatsen op afzuigaansluiting en lucht/wateraansluiting
- Biopsieventielkapje op ingang instrumentenkanaal
- Dikke slang op de afzuigaansluiting
- Blokje op de luchtpijp onder de lichtpenaansluiting



## DOORSPOELEN

- Alles 2 a 3 maal doorspoelen met reinigingswater
- Water verversen nu alleen schoonwater (liefst gedestilleerd water)
- Alles 2 a 3 maal doorspoelen met schoonwater
- Haal de scoop uit het water
- Droog de scoop, de ventielen, biopsieventielkapje

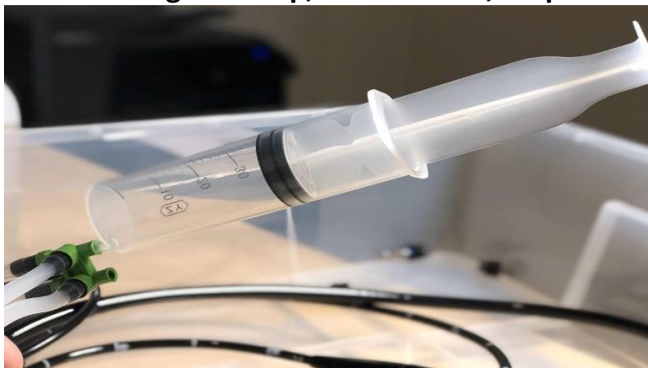

## OPRUIMEN

- Wanneer de scoop helemaal droog is kan de lektester ontluicht worden
- Draai de lektestkap van de scoop af
- Kunststof tip beschermer op de tip
- Scoop ophangen zodat het vocht uit de scoop kan lopen

